

NOTICE
MERCUROCHROME STOP COUPURES, bande stop saignement
06/2022

MERCUROCHROME STOP COUPURES, bande stop saignement

Bande auto-adhérente qui se découpe sans ciseaux destinée à stopper les saignements des petites coupures et des plaies superficielles par compression.

Usage Grand Public à partir de 3 ans.

Mode d'emploi :

- Pour une 1ère application :

Nettoyer les mains à l'eau et au savon avant utilisation.



1. Ouvrir le boîtier. Sortir la longueur de bande souhaitée.



2. Refermer le boîtier et appuyer fermement dessus pour bloquer la bande.



3. Tirer sur la bande vers le haut pour qu'elle se déchire.



4. Enrouler la bande autour du doigt.

- Pour les utilisations suivantes :

- Par mesure d'hygiène, n'utilisez pas la partie dépassant du conditionnement.
- Avant réutilisation, couper et jeter le morceau dépassant du conditionnement.
- Suivez ensuite le même mode d'emploi que pour la 1ère utilisation.

Précautions d'emploi

- Afin d'éviter un effet garrot (risque d'œdème ou nécrose):
 - Ne pas appliquer plus de 30 minutes.
 - Eviter une tension trop importante à la pose afin de garantir le flux sanguin.
 - Dès que vous sentez des sensations désagréables (picotements, troubles de la sensibilité ...), retirez ou desserrez immédiatement la bande.
 - Une fois la bande appliquée, ne pas utiliser d'objets susceptibles de s'accrocher avec la bande.

- Ne pas renouveler l'application une fois le saignement stoppé.
- Afin d'éviter un risque d'infection :
 - Ne pas réutiliser un morceau de bande déjà utilisée. La réutilisation d'un produit à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
 - Veiller à ne pas toucher la partie de la bande qui sera en contact avec la plaie.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine.
- Un professionnel de santé doit être consulté si le saignement n'est pas stoppé au bout de 15 minutes, en particulier si vous prenez des médicaments anticoagulants, ou si le saignement est important ou en jet.

Contre-indication

- Ne pas utiliser :
 - chez l'enfant de moins de 3 ans.
 - chez les personnes diabétiques.

Effets indésirables : Comme tout produit en contact avec la peau, ce produit peut provoquer des réactions cutanées telles qu'une irritation ou une allergie.

Pour minimiser tout risque d'infection ou de réactions cutanées :

Respecter scrupuleusement le mode d'emploi.

Ne pas réutiliser une bande usagée. Ne pas utiliser sur des plaies plus longues ou plus larges que la bande et susceptibles de déborder de celle-ci. Ne pas utiliser un produit endommagé.

Tout incident grave lié à ce produit doit être déclaré à SDPDM et à l'Agence Nationale des Produits de Santé (ANSM).

Date d'apposition du marquage CE : 2021

Dernière révision : V2 09-2021



SDPDM- 42 rue de Longvic - 21300 Chenôve – France

Distributeur : Laboratoires JUVA Santé – 8, rue Christophe Colomb – 75008 Paris