

**NOTICE**  
**MERCUROCHROME bande tissu spécial mouvements**  
**V5.0 02/2022**

MERCUROCHROME bande tissu spécial mouvements

Usage Grand Public  
Dispositif médical

Bande à découper pour la protection des plaies superficielles.  
EN TISSU, elle résiste à toutes les situations

- Son support
  - Extensible, accompagne vos mouvements
  - Micro-aéré, laisse respirer la peau
- Sa compresse
  - Anti-adhérente, ne colle pas à la plaie
- **Mode d'emploi :**
  - Nettoyer, désinfecter, rincer et sécher soigneusement la plaie et son pourtour.
  - Découper la bande en utilisant des ciseaux propres et désinfectés.
  - Appliquer la bande.
  - A renouveler une fois par jour.

▪ **Précautions d'emploi :**

En cas de corps étrangers dans la plaie, de saignement important, de morsure, de piqûre avec un objet pointu et/ou souillé ou si vous ne constatez aucune amélioration de la cicatrisation au bout de 6 jours, consultez votre pharmacien ou votre médecin

**Effets indésirables :** comme tout pansement, ce produit peut provoquer des réactions cutanées telles qu'une dermatite, une irritation ou encore une douleur au retrait.

**Pour minimiser tout risque d'infection ou de réactions cutanées :**

Respecter scrupuleusement le mode d'emploi. Ne pas réutiliser un pansement usagé.

Ne pas utiliser sur des plaies plus longues ou plus larges que la compresse et susceptibles de déborder de celle-ci. Ne pas appliquer sur les yeux, sur une peau fine ou sur une muqueuse. Ne pas utiliser après la date de péremption. Ne pas utiliser un produit endommagé.

Tout incident grave lié à ce produit doit être déclaré à SDPDM et à l'Agence Nationale des Produits de Santé (ANSM).

Date d'apposition du marquage CE : 2021

Dernière révision V5 : 02-2022



SDPDM – 42 rue de Longvic – 21300 Chenôve - FRANCE

Distributeur : Laboratoires JUVA SANTE – 8, rue Christophe Colomb – 75008 Paris