

NOTICE
MERCUROCHROME Pansements Bain
V7.0 06/2023

MERCUROCHROME Pansements Bain

Pansements prédécoupés pour la protection des petites plaies superficielles.

- IMPERMEABLE, il isole la peau de l'eau (mer, bains, douches)

- Son support
 - Perméable à l'air, laisse respirer la peau
 - Ultra-fin et transparent, il offre discrétion

- Sa compresse
 - Anti-adhérente, elle ne colle pas à la plaie

Contient 8 pansements de 20x72 mm, 5 pansements de 34x72 mm, 3 pansements de 53x72 mm.

▪ **Mode d'emploi :**

Nettoyer, désinfecter, rincer et sécher soigneusement la plaie et son pourtour.

Appliquer le pansement en lissant soigneusement les bords.

A renouveler 2 fois par jour.

▪ **Précautions d'emploi :**

Ne convient pas aux enfants de moins de 1 an. En cas de corps étrangers dans la plaie, de saignement important, de morsure, de piqûre avec un objet pointu et/ou souillé ou si vous ne constatez aucune amélioration de la cicatrisation au bout de 6 jours, consultez votre pharmacien ou votre médecin

- **Effets indésirables :** Comme tout pansement, ce produit peut provoquer des réactions cutanées telles qu'une dermatite, une irritation ou encore une douleur au retrait.

Pour minimiser tout risque d'infection ou de réactions cutanées :

Respecter scrupuleusement le mode d'emploi. Ne pas réutiliser un pansement usagé.

Ne pas utiliser sur des plaies plus longues ou plus larges que la compresse et susceptibles de déborder de celle-ci. Ne pas appliquer sur les yeux, sur une peau fine ou sur une muqueuse. Ne pas utiliser après la date de péremption. Ne pas utiliser un produit endommagé.

Tout incident grave lié à ce produit doit être déclaré à SDPDM et à l'Agence Nationale des Produits de Santé (ANSM).

Usage Grand Public

Date d'apposition du marquage CE : 2021

Dernière révision V7 : 06-2023



SDPDM – 42 rue de Longvic – 21300 Chenôve - FRANCE

Distributeur : Laboratoires JUVA SANTE – 8 rue Christophe Colomb – 75008 PARIS