

NOTICE
MERCUROCHROME Sparadrap Tissu Résistant
V3 - 12.2021

MERCUROCHROME Sparadrap Tissu Résistant

Indication : Fixation/ maintien de pansements ou de dispositifs médicaux sur zone de frottement ou de traction.

Mode d'emploi :

Appliquer sur une peau nettoyée, désinfectée à l'aide d'un antiseptique puis rincée avec du sérum physiologique et séchée. Après l'utilisation d'un antiseptique, rincer avec du sérum physiologique. Sécher soigneusement la plaie et son pourtour avant l'application du sparadrap tissu résistant Mercurochrome.

Le sparadrap est facilement déchirable pour adapter la longueur du ruban à l'usage.

Retirer délicatement et renouveler en moyenne toutes les 24 heures, ou selon prescription.

Précautions d'emploi :

Tenir hors de portée des enfants

Conçu pour coller sur la peau saine.

La présence concomitante de produits gras ou de poils, l'usage sur des zones humides, sur des zones articulaires, peuvent nuire à l'adhésivité et entraîner la perte du dispositif médical maintenu et un retard dans la cicatrisation (infection, multiples changements de pansements etc.)

Lors de la pose, ne pas créer de tension sur la peau ni le sparadrap (risque d'irritation, effet garrot).

Pour conserver des conditions optimales de cicatrisation, renouveler le sparadrap s'il est mouillé ou en cas de perte d'adhésivité.

Pour éviter tout risque d'irritation et de retard de cicatrisation, ne pas dépasser deux applications par jour. Ne pas utiliser plus de 30 jours consécutifs.

Le maintien de matériel médical doit avoir été expliqué par un professionnel de santé.

Ne pas stériliser.

Contre-indications : Ne convient pas pour la fixation/le maintien de matériel humide ou de sondes (hématologie, réanimation, couveuses).

Effets indésirables :

Ce sparadrap peut provoquer des réactions cutanées telles que des rougeurs, une irritation une dermatite ou encore une douleur au retrait, tout particulièrement sur peau sèche ou abimée.

En cas de réaction locale ou de démangeaison, arrêter l'utilisation du produit et consulter votre professionnel de santé.

Contient des dérivés de colophanes pouvant provoquer une allergie cutanée.

Pour minimiser tout risque d'infection ou de réactions cutanées :

Respecter scrupuleusement le mode d'emploi. Ne pas réutiliser un sparadrap usagé

Ne pas appliquer le sparadrap directement sur la peau lésée, sur les yeux, ou sur les muqueuses (risque d'irritation, inflammation, douleur).

Ne pas utiliser après la date de péremption. Ne pas utiliser un produit endommagé.

Tout incident grave lié à ce produit doit être déclaré à SDPDM et à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM).

Usage Grand public

Date d'apposition du marquage CE : 2021

Dernière révision : V3 12-2021



SDPDM– 42 rue de Longvic – 21300 Chenôte - FRANCE

Distributeur : Laboratoires JUVA SANTE – 8, rue Christophe Colomb – 75008 Paris - France