

NOTICE

MERCUROCHROME Spray nasal V03 : 05/2023

MERCUROCHROME Spray nasal

Indication : Spray nasal recommandé pour toute la famille, en usage quotidien pour laver et humidifier la muqueuse nasale, favoriser une bonne hygiène et si besoin aider au drainage des sécrétions.

Microdiffusion avec embout sécurité pour les nourrissons et les jeunes enfants.

Composition : eau purifiée, eau de mer filtrée (2%) : 3,093g, chlorure de sodium : 1,251g. Excipients : édétate disodique, chlorure de benzalkonium, hydroxyde de sodium, phosphate disodique. Gaz propulseur : azote

Conseils d'utilisation :

1. Pencher la tête sur le côté afin d'éviter le passage de la solution dans la gorge (Pour le nourrisson, le placer en position allongée).
2. Introduire délicatement l'extrémité arrondie de l'embout nasal à l'entrée de la narine supérieure. Effectuer 1 pulvérisation brève et franche.
3. Renouveler l'opération dans l'autre narine, en inclinant la tête de l'autre côté.
4. Redresser la tête pour laisser s'écouler les mucosités et essuyer le nez avec un mouchoir.
5. Nettoyer l'embout à l'eau chaude après chaque utilisation.
6. Renouveler l'opération 1 à 4 fois par jour si nécessaire

Précautions d'emploi :

- Doit être appliqué par un adulte pour les moins de 12 ans.
- Consulter un médecin avant utilisation si vous êtes enceinte ou allaitante.
- Ne pas laisser à la vue ni à la portée des enfants.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à au moins l'un des constituants ou aux ammoniums quaternaires.
- Au besoin nettoyer l'embout diffuseur à l'eau savonneuse mais ne pas stériliser.
- Le flacon peut être utilisé vertical, incliné ou la tête en bas. Cependant l'utilisation en position horizontale peut provoquer un épuisement du gaz propulseur et l'impossibilité d'utiliser la totalité du produit.
- **Usage nasal exclusif.** En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau.
- En cas de signes d'irritation nasale ou d'infection, demander un avis médical.
- Ne pas utiliser un même flacon pour plusieurs personnes (risque d'infection).
- Peut-être utilisé chez le nourrisson à partir de 1 mois.
- Respecter la date limite d'utilisation figurant sous le flacon.
- Ne pas utiliser le produit plus de 30 jours consécutifs.
- Conserver le flacon en position debout.
- Effets secondaires possibles : irritation, sensation de brûlure, saignement du nez
- Tout incident grave lié à ce produit doit être déclaré à SDPDM et à l'Agence Nationale des Produits de Santé (ANSM).

Attention. Récipient sous pression, peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas perforer ni brûler même après usage. Tenir hors de portée des enfants. Gaz propulseur inerte non inflammable sans contact avec la solution : azote.

Date d'apposition du marquage CE : 2022

Dernière révision : v3 05-2023



SDPDM- 42 rue de Longvic – 21300 Chenôve - France

Distributeur : Laboratoires JUVA SANTE – 8 rue Christophe Colomb – 75008 Paris - France